

Прокальцетонин (PCT)

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-500 (BiOLiS superior)

Тест №п.п. Название Оптические

Информация о данных

Единицы

Точность

Параметры анализа

Тип реакции

Осн. ДВ

Всп. ДВ

Метод

Калибровка

Тип

Концентрация стандарта.					
Бланк	0	#1	*	#2	*
#3	*	#4	*	#5	*
#6					

Авто-повтор

Скорость мешалок

М - 1

М - 2

Корреляция

Наклон Сдвиг

Y = * X +

Удалить Далее Печать Сохранить

*-вводится из паспорта к калибратору

Калибровка многоточечная (6 точек, 0 + 5ур.). Калибратор TruCal PCT.

В качестве бланка используйте калибратор уровень 0 из набора TruCal PCT.

Контроль TruLab PCT уровень 1 и 2.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест №п.п. Название Оптические

Аспирация

Реагентов ☐ Один ☒ Два

Тип	Объем	Единицы	Промывка	Пр.Объем
Образец	10	мкл.	0	
Реагент 1	120	мкл.		1: 70/70mL
Реагент 2	40	мкл.		2: 20/20mL

Бланк

☒ по воде ☐ по реагенту

Монитор реакции

Уровень "0"

Масштабирование

Данные процесса

Считывание

	Старт	Стоп
Основн.	38	70
Дополн.	0	0

Предел Абс. ~

Коррекция

Бланк

Предел кон.точки

Пров.линейности(%)

Проверка прозоны

	Старт	Стоп	Предел(%)
Первый			
Второй			

Мин. Abs. Среднее

Отклонени

☐ Вис. ☒ Ниж.

Удалить Возврат Далее Печать Сохранить

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении, фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Прокальцетонин (PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-500 (BiOLiS superior)

Тест №пп Название Оптическая

Границы норм

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...	0	0.5	0	0.5
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Критические границы

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...				
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Проверка реакций
☐ Вкл. ☒ Выкл.
Точк. пров.
Нижний
Верхний

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Тест №пп Название Оптическая

Авто повтор
☒ Вкл. ☐ Выкл.

Границы Авто повтора(Конц.)

	1-е развед.		Нижний			Верхний	
		*	Знач.	развед.	*	Знач.	развед.
Сыворот...	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	5
Моча	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Плазма	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
С.М.Ж.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Диализ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Другое	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Условия Авто повтора (Абс.)
Нижний ☐ Вкл. ☐ Выкл.
Верхний ☐ Вкл. ☐ Выкл.

Условия Авто повтора (Прозона)
☐ Вкл. ☐ Выкл.
Колич. образца

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.