

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

ПАРАМЕТРЫ

Пользователь: [Имя] | Профили: [Профиль] | Последовательность проведения тестов: [Секвенция] | Вычисляемые тесты: [Тесты] | Внешние тесты: [Тесты] | Рефлекс тесты: [Тесты]

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
Alb	
AMY	18
ALP	19
ALB	20
Amy.urea	21
TrUr	22

Основной параметр: Белок мочи | Тест: TPur | Код теста: ###*

Метод: Конечная точка

Основной фильтр: 600 | Дополнительный фильтр: [] | Ед. изм.: мг/л | Кол. зн. посл. зпт: 0

Объем R1 (мкл): 300 | Место R1: 21* | Время инкубации (с): 600 | Ём флакс: 18

Объем R2 (мкл): [] | Место R2: [] | Время инкубации (с): [] | Ём флакс: []

Объем образц. (мкл): 6 | Время считыв. (с): 40 | рост вращ. микс: Нормальн

Произв. реаг.: [] | Diasys: [] | Лизирующий р.: []

Информация о реагенте R1:

- Номер лота: ###*
- Штрихкод R1: []
- Срок годности: гgg-мм-дд*
- Эйствительно дн: []

Информация о реагенте R2:

- Номер лота: []
- Штрихкод R2: []
- Срок годности: []
- Эйствительно дн: []

Not found: [] | Not found: [] | Not found: [] | Автоматически: []

Y= 1.0 | X+ 0.0

Диапазон ре: 0.0000 | 0.0000 | 0.3450

Лин.диап.: 3000

Номер лота: []

Штрихкод реагента: []

Добавить | Удалить | Сохранить | Печать предв. просмотр | Печать | Импорт | Экспорт

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

КОНТРАКЧЕСТВА

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

СТАТИСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОЧИЙ МОНИТОР

ВЫХОД

ПАРАМЕТРЫ

Параметры теста

Профили

Последовательность проведения тестов

Вычисляемые тесты

Внешние тесты

Рефлекс тесты

Тест

Код теста

Тест

TPur

Код теста

##

Полное название

Белок мочи

Основное параметры

Нормальные величины

Калибровка

Количество стандартов

2

Тип калибровки

По двум точкам

Позиция стандарт

Концентрация стандарт

Оптическая плотность

1

39 *

2

40 *

0

3

4

5

6

Ред. OD.

Ист. калибр.

Тип пробирки

cup

№ лота калибр.

25881 *

Срок годности

2021-07-10 *

Номер лота

Добавить

Удалить

Сохранить

Печать предв. просмотр

Печать

Импорт

Экспорт

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
ALT	17
AMY	18
ALP	19
ALB	20
Amy.urea	21
TPUr	22

- * Выбирается пользователем.
- ** -Вводится из паспорта к калибратору
- *** -Рассчитывается анализатором

Тип калибровки: линейная, по стандарту . Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2