

ЛДГ (лактатдегидрогеназа)

DGKC-1970



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		LDH		
ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ				
Единицы	U/l			
Точность	0			
Параметры анализа				
Тип	RATE			
Осн.ДВ	340			
Всп.ДВ	546			
Метод	DGKC			
Коррекция				
Y =	Наклон	X +	СДВИГ	
	1		0	
Калибровка				
Тип: Линейный				
Стандарт				
#1	*	#4		
#2		#5		
#3		#6		
Значения норм				
	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворотка	0	480	0	480
Моча				
Плазма				
СМЖ				
Диализ				
Другое				
Страница: 1				
Печать				
Далее				
Сохранить				
Выход				

*-вводится из паспорта к калибратору

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Название		LDH	
Методика анализа			
Тип	<input type="radio"/> 1-реар <input checked="" type="radio"/> 2-реар		
Образец	3	ОБЪЕМ	μl
Реагент 1	200		
Реагент 2	50		
3-е перем.. <input checked="" type="radio"/> вых <input type="radio"/> вкл			
Бланк <input checked="" type="radio"/> по воде			
Экран			
Точка "0"	1		
Диапазон	3		
ОБРАБОТКА ДАННЫХ			
Считывание			
	Старт	Стоп	
Основн.	35	47	
Дополн.			
Предел Абсорбции			
	Нижн.	0	
	Верхн.	3	
Фактор			
Корр. бланка	**	ПРЕДЕЛ КОН. Т.	0
ЛИНЕЙНОСТЬ(%) 90			
Авторазведение образца			
Развести	<input checked="" type="radio"/> 99:Разв.1	<input type="radio"/> 100:Разв.2	
ПРОВЕРКА ПРОЗОНЫ			
	Старт	Стоп	ПРЕДЕЛ(%)
ПЕРВЫЙ			
ВТОРОЙ			<input checked="" type="radio"/> Нижн. <input type="radio"/> Верхн
Страница: 2			
Печать			
Предыдущ.			
Далее			
Сохранить			
Выход			

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название	LDH
----------	-----

Повтор с авторазведением

☒ Вкл
 ☐ выкл

Предел линейности методики

☐ вк
 ☒ вык
 ☐ вкл
 ☐ выкл

	Нижн.	Верхн.
Сыворотка	5	1200
Моча		
Плазма		
СМЖ		
Диализ		
Другое		

Объемы флаконов для реagenтного штатива (мл)

На 24 позиции		На 36 позиций	
РЕАГЕНТ1	60	РЕАГЕНТ1	32,5
РЕАГЕНТ2 P1	40	РЕАГЕНТ2 P1	26,25
РЕАГЕНТ2 P2	20	РЕАГЕНТ2 P2	13

Авторазведение по заданному пределу абсорбции

Предел абсорбции

Нижн. ☐ вкл ☒ вык
 Верхн. ☐ вкл ☒ вык

Предел прозоны ☐ вкл ☒ вык

Предупреждающий диапазон

	Мужчина		Женщина	
	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.
Сыворотка				
Моча				
Плазма				
СМЖ				
Диализ				
Другое				

Страница: 3

Печать

Предыдущ.

Сохранить

Выход

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !