

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400 (BiOLiS premium)

Тест №пп	Название	Phos	Полн.назв	Фосфор	Оптическая																								
Информация о данных																													
Единицы	ммол/л																												
Точность	2																												
Параметры анализа																													
Тип реакции	Конечная точка																												
Основн. ДВ	340																												
Вспом. ДВ	546																												
Метод	Molybd																												
Коррекция																													
$Y = \text{Наклон} \cdot X + \text{Сдвиг}$ Y = 1 * X + 0																													
Калибровка																													
Тип: Линейный 1																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Концентрация стандарта.</th> </tr> <tr> <td>Бланк</td> <td>0</td> <td>#1</td> <td>*</td> <td>#2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#3</td> <td></td> <td>#4</td> <td></td> <td>#5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Концентрация стандарта.						Бланк	0	#1	*	#2		#3		#4		#5		#6					
Концентрация стандарта.																													
Бланк	0	#1	*	#2																									
#3		#4		#5																									
#6																													
Стаб. 0																													
Мин. фактор 0 Макс. фактор 0																													
CV Макс. 0																													
Объем флаконов(мл.)																													
24 позиции																													
Реагент 1 60																													
Реагент 2 R1 40																													
Реагент 2 R2 20																													
36 позиций																													
Реагент 1 40																													
Реагент 2 R1 25																													
Реагент 2 R2 13																													
Удалить Далее Копия Печать Сохранить																													

*-вводится из паспорта к калибратору

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест №пп	Название	Phos	Полн.назв	Фосфор	Оптическая
Аспирация					
Реагентов <input type="radio"/> Один <input checked="" type="radio"/> Два					
Объем					
Тип	Количество	Единицы			
Образец	2	мкл.			
Реагент 1	200	мкл.			
Реагент 2	50	мкл.			
Значения бланка					
<input checked="" type="radio"/> по воде <input type="radio"/> по реагенту					
Монитор реакции					
Уровень "0" 1					
Масштабирование 3					
Данные процесса					
Считывание					
	Старт	Стоп			
Основн.	41	43			
Дополн.	29	31			
Предел Абс.					
Низк. -3 ~ Верхн. 3					
Коррекция					
Бланк **					
Предел кон. точки 3					
Пров. линейности(%) 90					
Проверка прозоны					
	Старт	Стоп	Предел(%)		
Первый					
Второй					
<input type="radio"/> Выс. <input checked="" type="radio"/> Низк.					
Удалить Возврат Далее Печать Сохранить					

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении, фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400 (BiOLiS premium)

Тест №пп Название Полн.назв Оптическая

Границы норм

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...	0.8	1.45	0.8	1.45
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Критические границы

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...				
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Проверка реакций

☐ Вкл. ☒ Выкл.

Точк.пров.

Нижний

Верхний

Удалить Возврат Далее Печать Сохранить

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Тест №пп Название Полн.назв Оптическая

Авто повтор ☒ Вкл. ☐ Выкл.

Условия Авто повтора (Абс.)

Нижний ☐ Вкл. ☒ Выкл.

Верхний ☐ Вкл. ☒ Выкл.

Условия Авто повтора (Прозона)

☐ Вкл. ☒ Выкл.

Границы Авто повтора(Конц.)

	1-е развед.	Нижний		Верхний	
		* Знач.	развед.	* Знач.	развед.
Сыворот...	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.06	<input checked="" type="checkbox"/>	9.69
Моча	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Плазма	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
С.М.Ж.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Диализ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Другое	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Разведение ☒ 99:Di11 ☐ 100:Di12

Удалить Возврат Печать Сохранить

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно