

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400 (BiOLiS premium)

Тест №пп	Название	Mg	Полн.назв	Магний	Оптическая																								
Информация о данных																													
Единицы	ммол/л																												
Точность	2																												
Параметры анализа																													
Тип реакции	Конечная точка																												
Основн. ДВ	546																												
Вспом. ДВ	700																												
Метод	XylB																												
Калибровка																													
Тип	Линейный 1																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Концентрация стандарта.</th> </tr> <tr> <td>Бланк</td> <td>0</td> <td>#1</td> <td>*</td> <td>#2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#3</td> <td></td> <td>#4</td> <td></td> <td>#5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Концентрация стандарта.						Бланк	0	#1	*	#2		#3		#4		#5		#6					
Концентрация стандарта.																													
Бланк	0	#1	*	#2																									
#3		#4		#5																									
#6																													
Стаб.	0																												
Мин. фактор	0		Макс. фактор	0																									
CV Макс.	0																												
Объем флаконов(мл.)																													
24 позиции			36 позиций																										
Реагент 1	60		Реагент 1	40																									
Реагент 2 R1	40		Реагент 2 R1	25																									
Реагент 2 R2	20		Реагент 2 R2	13																									
$Y = 1 \cdot X + 0$																													
Удалить		Далее		Копия Печать Сохранить																									

*-вводится из паспорта к калибратору

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест №пп	Название	Mg	Полн.назв	Магний	Оптическая
Аспирация					
Реагентов	<input checked="" type="radio"/> Один <input type="radio"/> Два				
Объем	Тип	Количество	Единицы		
Образец		2.5	мкл.		
Реагент 1		250	мкл.		
Значения бланка					
<input checked="" type="radio"/> по воде <input type="radio"/> по реагенту					
Монитор реакции					
Уровень "0"	1				
Масштабирование	3				
Данные процесса					
Считывание		Старт	Стоп		
Основн.		20	22		
Дополн.		9	11		
Предел Абс.		Низк.	Верхн.		
		-3	3		
Коррекция					
Бланк		**			
Предел кон. точки		3			
Пров. линейности(%)		90			
Проверка прозоны					
	Старт	Стоп	Предел(%)		
Первый					
Второй				<input type="radio"/> Выс. <input checked="" type="radio"/> Низк.	
Удалить		Возврат		Далее Печать Сохранить	

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении, фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400 (BiOLiS premium)

Тест №пп Название Полн.назв

Границы норм

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...	0.73	1.06	0.77	1.03
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Критические границы

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...				
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Проверка реакций

☐ Вкл. ☒ Выкл.

Точк.пров.

Нижний

Верхний

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Тест №пп Название Полн.назв

Авто повтор

☒ Вкл. ☐ Выкл.

Условия Авто повтора (Абс.)

Нижний ☐ Вкл. ☒ Выкл.

Верхний ☐ Вкл. ☒ Выкл.

Условия Авто повтора (Прозона)

☐ Вкл. ☒ Выкл.

Границы Авто повтора(Конц.)

	1-е развед.		Нижний			Верхний	
		*	Знач.	развед.	*	Знач.	развед.
Сыворот...	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.05	6
Моча	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Плазма	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
С.М.Ж.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Диализ	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Другое	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Разведение

☒ 99:Di11 ☐ 100:Di12

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно