

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Т

Перенос

Профиль

Выч.

Внесист

STAT

Т.

ХЭст

Основ

Номин

Калиб

Контр

Инд.с

Кач.ум.

Информац теста

№

*

Т

ХЭст

П.наз

Холинэстераза

Стан№

Объем ргт

R1

160

R2

40

R3

R4

Объем проб

Станд

3.2

Увел.

6.4

Умен.

2

Параметры реакции

Тип р

Кинетически

Напр.

Уменьшен

Пер.к

412

Хол р

0

0

Вто.к

570

Вр.в.

52

75

Настройка результ

Десят

1

Уг.

1

Бл.

U/L

Отс.

0

Критерии правил

Погл.

0

0

Диап.

50

20000

Увел

0

Лимит

Умен

0

М суб

Проз.

Част

Ант

Q1

0

Q2

0

Q3

0

Q4

0

PC

0

ABS

0

Добав

Удал.

Сохран.

Отмен

Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

[illegible]

******-вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.