

# ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Итипо (прямой иммуно)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

**Thermo SCIENTIFIC** ЛПВП

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста:

Тест в работе:

Полное имя:

Сетевое имя:

Пределы теста: Мин 0, Макс 14, Ед. ммоль/л

Начальн. абс: 0, 3.000, А

Предел разв-я: \*, 4.7, ммоль/л

Вторич раз-е 1 +: 0.0, 2

Границы:

Кол-во знаков:

Подтверждение:

Разведение 1 +:

Тип образца: ☒ Сыворотка, ☒ Плазма, ☐ Моча, ☐ СМЖ, ☐ Другие

Дата коррекции:

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	1	4.7	ммоль/л	ДА
Муж	0.9	4.7	ммоль/л	ДА

Гран.норм	Мин	Макс	В работе
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ДА"/>

Коррекция фактора:

Коррекция смещ.:  ммоль/л

F1 Новый тест, F2 Сохранить, F3 Отменить, F4 Выбор теста, F5 Калибр. парам., F6 КК парам., F7 Тест дозир., F8 --далее--

\* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Дозировка

**Thermo SCIENTIFIC** ЛПВП

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон:

Избыток антиг.:

Кювета обычная

Дозируемый объем:

Реактив	Образец	Инкубация	Кон.точка	Реактив	Инкубация	Кон.точка
Реактив: HDLD_1	Объем (мкл): 2	Время (сек.): 420	Фон	Реактив: HDLD_2	Время (сек.): 420	Длина волны (нм): 600 nm
Объем (мкл): 180			Ответ мин. (А): *	Объем (мкл): 45		Дополн. длина: 700 nm
Диспенсир. с: Экстра	Диспенсир. с: Экстра		Ответ макс. (А): 1.5	Диспенсир. с: Экстра		Тип измерения: Фиксир. время
Объем (мкл): 10	Объем (мкл): 8			Объем (мкл): 8		
Моющий раствор: [Нет]	Разбавл-е с: Вода			Моющий раствор: [Нет]		
	Моющий раствор: [Нет]					

F1, F2 Сохранить, F3 Отменить, F4 Выбор теста, F5 Тесты, F6 Предварит этап, F7 Стереть следующие, F8

# ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Иттипо (прямой иммуно)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC ЛПВП

Образцы Данные Реактивы Меню

Тип калибровки	Линейный	Фактор		Смещение	
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)	
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)	
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество	
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный	
Калибраторы		Стандарт	Конц.	коэф. разв.	Код смещения std
Концентрация		NaCl 0.9%	0	0.0	
Коэф. разв. 1 +		TruCalHDL/LDL	**	0.0	

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

\*\* -вводится из паспорта к калибратору

**ВАЖНО!** В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

В данной версии адаптации в качестве разбавителя образцов используется вода. При необходимости в меню «Тест дозирование» выберите другой тип разбавителя.

В связи с техническими особенностями анализатора соотношение образца и реагента в данной адаптации изменено относительно инструкции.

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.