


# Комплемент C4 (DiaSys)

ImmunoTD (иммунотурбодиметрический)

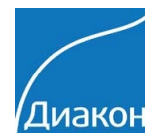

Параметры для ввода в программу анализатора Urit 8031; VitaRay - 300; BioLit-8020; Eos Bravo 200

Промывка игл Промывка кювет AD Тесты Работа Срочные Журнал Обзор Температура Помощь Смена пользователя Выход

Список тестов Код C4\_D Тест C4

Метод Установка дозирования, инкубации и измерения Нормальный диапазон Установки

Assay Дифференциальный Длина волны 340 Длина волны NONE

Точность 3 Едини g/L Приоритет PRI\_13 ☐ Оч перед измер y=ax+b ☐ Оч после теста

a 1.00 b 0.00 Фактор 1.00

Повторы калибровки 2 STD Number 6

Калибраторы Парвило калибровки Logistic-Log 5P

S1	0.000	S2	*	S3	*
S4	*	S5	*	S6	*

<< < > >> + Добавить Сохранить X Удалить Печать

\* - Вводятся из паспорта к калибратору!

Промывка игл Промывка кювет AD Тесты Работа Срочные Журнал Обзор Температура Помощь Смена пользователя Выход

Список тестов Код C4\_D Тест C4

Метод Установка дозирования, инкубации и измерения Нормальный диапазон Установки

	Объем(мкл)	Инкубация(с)	Позиция 1	Позиция 2	Позиция 3
P1	150.0	180	13		
P2	30.0	300	14		

Объем образца 4.3 Точки измерения(Время=Точки измерен\*Цикл) 2

<< < > >> + Добавить Сохранить X Удалить Печать

# Комплемент C4 (DiaSys)

ImmunoTD (иммунотурбодиметрический)



Промывка игл Промывка кювет AD Тесты Работа Срочные Журнал Обзор Температура Помощь Смена пользователя Выход

Список тестов Код C4\_D Тест C4

Метод Установка дозирования, инкубации и измерения Нормальный диапазон Установка

	Норма Н	Норма В
Бланк	-3.0000	3.0000
Мужчины	0.100	0.400
Женщины	0.100	0.400
Дети		

Линейность до 0.90

☐ Abs warning

☐ Superlinear auto retest

☒ Образец ☐ Разведение

<< < > >> + Добавить Сохранить X Удалить Печатать