

Параметры теста для VITALAB FLEXOR / SELECTRA

Железо

ДДС

Параметры теста 1	Параметры теста 2
Общие положения Наименование: Железо Аббревиатура: Fe Код: Метод: Две точки Длина Волны: 578 нм Единицы: мкМ/л Десятичных знаков: 1 ПовторовТест: 1 Пределы концентрации: 3 - 400 мг/л Назв. калибратора: TruCal U Проверка прозоны: Нет	Типы проб Normal Urine Разрешено: Да Предразведение: Нет Референсные значения Мужской: 11.6 - 30.4 мг/л Женский: 9.0 - 30.4 мг/л Педиатрический: 0.0 - 0.0 мг/л Панический: 0.0 - 0.0 мг/л Управление Контроль №1: TruLab N Контроль №2: TruLab P Контроль №3: Корреляция Корреляц. фактор: 1,000 Корреляц. сдвиг: 0,0 мг/л

Параметры теста 1	Параметры теста 2
Общие положения Наименование: Железо Предразведение: Нет Проба Бланк Пробы: Нет объем пробы: 30.0 мкл при перезапуске: 5.0 мкл Реактивы Бланк Реагента: Нет объем пробы: 200 мкл при перезапуске: 200 мкл Добавление реактива через -2,25 минут (R1) 0.0 мкл Добавление реактива через 2,90 минут (R2) 0.0 мкл Добавление реактива через 4,70 минут (R3) 50 мкл	Измерение Бланк Наклона: Нет Точки 1-я, 2-я: -4 344 сек при несовпадении точек, выбрать ближайшее большее Пределы абсорбции Абсорбция: -0,100 - 3,000 Абс Абсорбция R: -0,100 - 3,000 Абс Отклонение Абс.Pear. 0,100 Абс