

Параметры теста для VITALAB FLEXOR / SELECTRA

Кальций (Ca, арсеназо III)

ДиаС

Параметры теста 1	Параметры теста 2
Общие положения Наименование: Кальций Аббревиатура: Ca Код: Метод: Монох. конечная точка Длина Волны: 660 нм Единицы: mmol/l Десятичных знаков: 1 ПовторовТест: 1 Пределы концентрации: 1 - 5.0 ммоль/л Назв. калибратора: TruCal U Проверка прозоны: Нет	Типы проб Normal Urine Разрешено: Да Предразведение: Нет Референсные значения Мужской: 2.15 - 2.57 ммоль/л Женский: 2.15 - 2.57 ммоль/л Педиатрический: 0 - 0 ммоль/л Панический: 0 - 0 ммоль/л Управление Контроль №1: TruLab N Контроль №2: TruLab P Контроль №3: Корреляция Корреляц. фактор: 1,000 Корреляц. сдвиг: 0,00 ммоль/л

Параметры теста 1	Параметры теста 2
Общие положения Наименование: Кальций Предразведение: Нет Проба Бланк Пробы: Нет объем пробы: при перезапуске: 2.5 μl 2.0 μl Реактивы Бланк Реагента: Да 0,0000 Абс Повторое2 объем пробы: при перезапуске: Добавление реактива через -2,25 минут (R1) 250 μl 300 μl Добавление реактива через 2,90 минут (R2) 0 μl 0 μl Добавление реактива через 4,70 минут (R3) 0 μl 0 μl	Измерение Бланк Наклона: Нет Время инкубации 4.5 мин Пределы абсорбции Абсорбция: -0,100 - 3,000 Абс Абсорбция R: -0,100 - 3,000 Абс